

# ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA COLETA DE PAINEL LMA NO FLEURY

## 1. EXAMES INCLUSOS NO PAINEL

ITDFLT3 | TKDFLT3 | CEBPA | MUTNPM1 | FISHSMDLMA

**PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES A AMOSTRA DEVE SER PREFERENCIALMENTE MEDULA ÓSSEA**

## 2. COLETA DO MATERIAL

### 2.1 Coleta de material em **Medula Óssea**:

- 4 tubos de 3 mL de medula óssea em tubo com anticoagulante EDTA. Enviar no próprio tubo de coleta.
- Coletar também 0,5 ml a 3,0 mL de medula óssea em seringa heparinizada (0,5 mL de heparina sódica 5.000 UI.)

### 2.2. Coleta de material em **Sangue Periférico**:

- Para a realização do exame a quantidade de blastos deve informada pelo médico com cópia de hmg no qual conste o total de blastos/mm<sup>3</sup> (30-50%).
- 5 tubos de 3 mL de sangue em tubo com anticoagulante EDTA.
- A coleta em sangue periférico só deve ser realizada em caso de impossibilidade de coleta da medula óssea.
- Coletar também um tubo de 5 ml de sangue com anticoagulante heparina sódica de tampa verde ou EDTA.

Para sangue periférico a alteração pesquisada pode não ser identificada devido à falta de blastos na amostra.

### **OBSERVAÇÕES:**

- O material precisa ser refrigerado logo após a coleta e durante todo o transporte, devendo ser recebido na seção processante preferencialmente em até 24 horas.
- Enviar o sangue periférico no próprio tubo de coleta, tubo novo, não reutilizado, não reprocessado e estéril.
- Não será aceito material enviado em seringa com agulha.
- Serão consideradas amostras inadequadas, quando estiver fora do prazo de estabilidade, coaguladas e com baixo volume. Para sangue periférico o exame não será realizado caso não tenha a quantidade suficiente de blastos.
- Somente serão aceitas amostras colhidas em heparina sódica de tampa verde ou em EDTA. **NÃO SERÁ ACEITO AMOSTRAS EM TUBO LIVRE DE METAL COM ANTICOAGULANTE HEPARINA SÓDICA.**

## 3. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Pedido médico e Questionário Fleury.

PARCERIA

**Cuidar+**  
Painel LMA (Oncologia)

**fleury** medicina  
e saúde | Genômica

**Pfizer**